

Netti® Combi Aqua

Badebukse

Netti Combi Aqua er utviklet i tett samarbeid med helsepersonell og brukere. Produktet bygger på en kombinasjon av to enheter, noe som gir store funksjonsfordeler. Innerbuksen brukes ved behov sammen med et inkontinensprodukt. Ytterbuksen, med sitt høyelastiske materiale som ikke absorberer væske, forsterker innerbuksens tetthet. Prinsippet med to enheter gjør på- og avkledningen enkel og smidig for både brukeren og personalet.



- 1 Material**
Innerbuksens material er lett og rasle-fri.
- 2 Strikk**
Innerbuksens strikk i midjen og ben er belagt med silikon for å være tett mot huden.
- 3 Tettende funksjon**
Ytterbuksens høyelastiske material forsterker innerbuksens tetthet.
- 4 Væskeavvisende**
Ytterbuksens material absorberer ingen væske noe som beskytter mot fuktighet.
- 5 Størrelsesmarkering**
Sømmens farge på innerbuksen viser buksens størrelse.

Material:

Innerbukse: 100 % Polyuretan

Utsiden er belagt med 100% polyester

 Ytterbukse: 80 % Tactel micro fiber
20 % Lycra

Latexfri

Vaskeanvisning:

Innerbukse: Max 95°C

Ytterbukse: Max 60 °C

Skyll buksene godt etter bad.

Tåler tørketrommel (unngå høy temperatur).


Målanvisning:

For å velge rett størrelse er det veldig viktig å ta mål av brukeren.

1. Mål midjens omkrets
2. Mål benenes omkrets høyest opp på låret

Utgå fra tabellen nedenfor og velg den buksen som best stemmer overens med brukers egne mål. Målene som oppgis i tabellen angir buksenes størrelse i ikke utstrakt til utstrakt størrelse (f.eks. for str Barn 1 er innerbuksens midjemål 37 cm i ikke utstrakt posisjon og 51 cm i utstrakt posisjon). Om brukers mål stemmer overens med flere størrelser, velg den minste. For å unngå lekkasje er det veldig viktig at buksen sitter tett mot huden. Bruk et så lite inkontinensprodukt som mulig. Unngå å bruke en fikseringsbukse under badebuksen, da den kan komme mellom huden og innerbuksens strikk, noe som kan føre til lekkasje.

Sortiment	Art.nr.	Innerbukse		Ytterbukse		Fargekode	Forp.
		Midjemål	Benomkrets	Midjemål	Benomkrets		
Barn 1	260 002	37-51 cm	20-28 cm	44-60 cm	20-32 cm	Grønn	1 stk
Barn 2	260 003	42-56 cm	26-36 cm	48-70 cm	23-36 cm	Rød	1 stk
Barn 3	260 004	48-62 cm	32-44 cm	48-70 cm	23-36 cm	Gul	1 stk
Dame 1	260 000	52-85 cm	30-52 cm	50-86 cm	26-54 cm	Gul	1 stk
Dame 2	260 005	57-95 cm	35-58 cm	56-96 cm	28-60 cm	Blå	1 stk
Dame 3	260 010	62-105 cm	40-64 cm	62-106 cm	32-66 cm	Brun	1 stk
Dame 4	260 015	67-110 cm	45-70 cm	66-120 cm	36-80 cm	Grønn	1 stk
Dame 5	260 020	72-120 cm	50-76 cm	66-120 cm	36-80 cm	Svart	1 stk
Herre 1	260 001	52-85 cm	30-52 cm	50-86 cm	26-54 cm	Gul	1 stk
Herre 2	260 006	57-95 cm	35-58 cm	56-96 cm	28-60 cm	Blå	1 stk
Herre 3	260 011	62-105 cm	40-64 cm	62-106 cm	32-66 cm	Brun	1 stk
Herre 4	260 016	67-110 cm	45-70 cm	66-120 cm	36-80 cm	Grønn	1 stk
Herre 5	260 021	72-120 cm	50-76 cm	66-120 cm	36-80 cm	Svart	1 stk