



Idealbinden®

Stödbinda med lågelastisk kompression

Idealbinden är ett stödförband med lågelastisk kompression. Idealbinden kan användas för många olika ändamål och har ett högt ekonomiskt värde eftersom bindan kan återanvändas flera gånger



- 1 Idealbinden har en elasticitet på 100%
- 2 Kan kokas och steriliseras
- 3 Fungerar vid alla typer av fixering och som stödförband

Fördelar:

Bekväm att bära
Elastisk
Många användningsområden
Kan återanvändas
Stadiga kanter



Egenskaper

Bindan är elastisk och har vävda kanter som ger stabilitet och bibehåller bindans form. Bindan ger ett högt arbetstryck och ett lågt vilotryck vilket gör att den även kan bäras av stillasittande personer. Normalt tas bindan av under natten och lindas på igen på morgonen. För att nå bästa resultat bör framförallt smala ben polstras till normal form innan lindning.

Material

100% bomull
Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I osteril.
CE-märkt enligt EU-förordningen 2017/745 MDR.
Utsträckt längd: 5m
Outsträckt längd: 2,5m
Elasticitet: 100%

Avsedd användning

Som stödförband vid amputation och ledbands-skador. För kompression med ödem-behandling och fixering av förband och gipsskenor.

Kontraindikationer: Arteriell ocklusionssjukdom.

Tvättråd

Idealbinden kan steriliseras i autoklav vid 134°C och tvättas i 95 °C ett fåtal gånger.

Efter tvätt återfår Idealbinden sin elasticitet.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Idealbinden® Styckförpackad i cellofan	5m x 6cm	931 012	1 st	120 Afp
	5m x 8cm	931 013	1 st	90 Afp
	5m x 12cm	931 015	1 st	60 Afp
	5m x 15cm	931 016	1 st	48 Afp
Idealbinden® Lösa i förpackning	5m x 6cm	931 860	10 st	16 Afp
	5m x 8cm	931 861	10 st	12 Afp
	5m x 10cm	931 862	10 st	10 Afp