



# Idealbinden®

## Støttebind med lavelastisk kompression

Idealbinden er en støtteforbinding med lav-  
elastisk kompression. Idealbinden kan  
anvendes til mange forskellige formål og er  
desuden meget økonomisk i brug, eftersom det  
kan genanvendes flere gange.



- 1 Idealbinden har en elasticitet på 100%
- 2 Kan koges og steriliseres
- 3 Fungerer ved alle typer af fiksering og som støtteforbinding

## Fordele:

Behagelig at have på  
Elastisk  
Mange anvendelsesområder  
Kan genanvendes  
Faste kanter



## Egenskaber

Bindet er elastisk og har vævede kanter, som giver stabilitet og opretholder bindets form. Bindet giver et højt arbejdsstryk og et lavt hviletryk, hvilket gør, at det også kan anvendes af stillesiddende personer. Normalt aftages bindet om natten og tages på igen om morgenen. For at opnå det bedste resultat bør især tynde ben polstres til normal form, inden bindes påføres.

## Materiale

100% bomuld. Hvid.  
Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, usteril. CE-mærket ifølge EU-forordning 2017/745 MDR.  
Udstrakt længde: 5 m.  
Uudstrakt længde: 2,5 m.  
Elasticitet: 100%

## Indikation

Som støtteforbinding ved amputationer og ledbåndsskader. Til kompression med ødem-behandling samt fiksering af forbindinger og gipsskinner.

Kontraindikationer: Arteriel okklusionssygdom.

## Vaskeråd

Idealbind kan steriliseres i autoklave ved 134°C og vaskes ved 95°C nogle få gange.  
Efter vask genvinder Idealbind sin elasticitet.

PAUL HARTMANN A/S  
Ørestads Boulevard 73  
2300 København  
T. 48 22 04 00  
E. info@dk.hartmann.info

[www.dk.hartmann.info](http://www.dk.hartmann.info)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)

Sortiment	Størrelse	Varenr	Afp	Tfp
Idealbinden® Pakket enkeltvis i cellofan	5m x 6cm	931 012	1 stk	120 Afp
	5m x 8cm	931 013	1 stk	90 Afp
	5m x 12cm	931 015	1 stk	60 Afp
	5m x 15cm	931 016	1 stk	48 Afp
Idealbinden® Pakket løse i æske	5m x 6cm	931 860	10 stk	16 Afp
	5m x 8cm	931 861	10 stk	12 Afp
	5m x 10cm	931 862	10 stk	10 Afp