


# PermaFoam Classic®

## PermaFoam Classic® Border

Polyuretanskumbandage

PermaFoam Classic er en absorberende polyurethanskumforbinding til behandling af moderate til kraftigt væskende sår. Bandagen har en tredimensionel skumstruktur for hurtig og effektiv absorption. PermaFoam Classic opretholder et fugtigt sårhelingsmiljø.

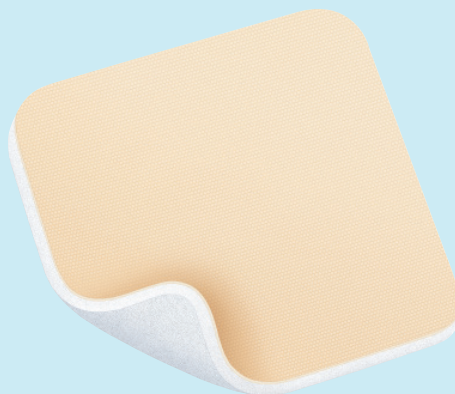

- 1 Høj absorptionskapacitet
- 2 Blød og polstrende
- 3 Findes også med klæbekant

## Fordele:

Høj absorptionskapacitet  
Bibeholder fugtigt sår miljø  
Blød, patientkomfort  
Kan sidde på i op til 7 dage  
Mange størrelser



## Egenskaber

Bandagen fås i to versioner, med eller uden klæbekant. Pjeceversionen har det ekstra navn Border. Forbindingen har en tredimensionel struktur, der giver effektiv absorption, samtidig med at det opretholdes et fugtigt sårhelende miljø. Bandagen kan forblive på såret i op til 7 dage afhængigt af mængden af ekssudat og sårets tilstand.

## Materialer

Bandagen består af polyurethanskum. PermaFoam Classic Border har et acrylbaseret klæbemiddel. Produktet er klassificeret som medicinsk udstyr, klasse IIb, sterilt. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

## Indikation og anvendelse

Til behandling af moderate til kraftigt væskende sår, f.eks. kroniske bensår og tryksår. Bandagen kan bruges under kompression.

Bandagen skal appliceres, så ca 1-2 cm når ud over sårkanten. Jo større sår, jo mere bør bandagen overlape sårkanterne. Om nødvendigt kan bandagens størrelse justeres med en steril saks.

Den hvide side skal vende mod såret og den beige, top skal vende op. PermaFoam Classic fikses med et fikseringsbånd eller tubegaze afhængigt af sårets placering.

PermaFoam Classic Border fikses med den integrerede klæbekant.

PAUL HARTMANN A/S  
Ørestads Boulevard 73  
2300 København  
T. 48 22 04 00  
F. 48 22 04 01  
E. info@dk.hartmann.info

[www.dk.hartmann.info](http://www.dk.hartmann.info)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Afp	Tfp
PermaFoam Classic® Steril, pakket enkeltvis	10 x 10 cm	882000	10 stk	6 AFP
	20 x 10 cm	882002	10 stk	6 AFP
	15 x 15 cm	882001	10 stk	6 AFP
PermaFoam Classic® Border	10 x 10 cm	882006	10 stk	6 AFP
	15 x 15 cm	882007	10 stk	6 AFP
PermaFoam Classic® Sacral Steril, pakket enkeltvis	18 x 18 cm	882011	10 stk	6 AFP
	22,5 x 22,5 cm	882012	10 stk	10 AFP
PermaFoam Classic® Trakeostomi Steril, pakket enkeltvis	8 x 8 cm	882005	10 stk	24 AFP