


HydroTac® transparent

Transparent gelforbinding

Ved behandling af tørre og let væskende sår fungerer HydroTac transparent som en blødgører. Forbindingen fugter såret og absorberer eksudat hvilket ger en bedre helingsmiljø. Forbindingen er blød, smidig og behagelig for patienten at have på.

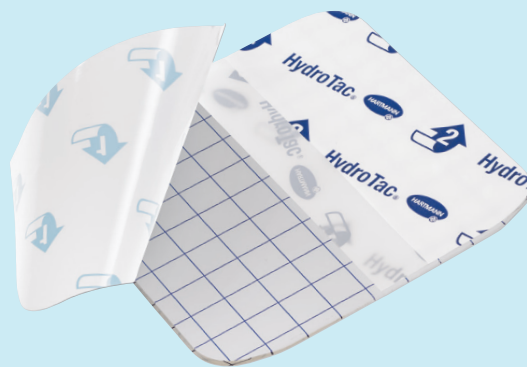

- 1 HydroTac transparent Comfort har en bred klæbekant for at lette fikseringen
- 2 Kan sidde på plads i op til 7 dage
- 3 Transparent for visuel sårkontrol
- 4 For tørre og let væskende sår

Fordele:

- Enkel håndtering
- Blød og komfortabel
- Beskytter såret
- Transparent for visuel kontrol



Egenskaber

HydroTac transparent skaber en fugtigt sår miljø og er velegnet til behandling af tørre og let væskende sår. Forbindingen kan blive siddende på plads i op til 7 dage afhængig af sårets tilstand. Forbindingen kan skiftes uden at irritere det nye væv og desuden helt smertefrit for patienten, da den ikke fæstner i såret. Da forbindingen er transparent kan såret nemt inspiceres uden forbindingskift. HydroTac transparent har desuden gennem gelens bløde elastiske egenskaber en god polstringseffekt, som beskytter såret fra ydre påvirkning.

Materiale

Hydrogelforbinding dækket med lag af semipermeabel polyuretanfilm. Hydrogelen er lavet af polyuretan i matrixstruktur, som indeholder ca. 60% vand. HydroTac transparent komfort har en akrylatbaseret klæber. Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse IIb, steril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

Indikation og applikering

Til behandling af tørre og let væskende sår med en ring helingsfrekvens. Kan anvendes på overfladiske forbrændinger, overfladiske traumatisk sår og irriteret hud (smerter, udslæt og kløe)

Kontraindikationer: Bør ikke anvendes i tilfælde af klinisk infektion eller ved 3. grads forbrændinger. Må ikke bruges af personer med intolerance over for indholdsstoffer.

Til fiksering af HydroTac transparent anbefales det at bruge fikseringsbind eller tape. HydroTac transparent komfort har derimod en klæbekant, som på enkelt vis holder forbindingen på plads.

Sortiment	Størrelse	Varenr	AFP	TFP
HydroTac® transparent Steril, pakket enkeltvis	5 x 7,5 cm	685 905	10 stk	12 AFP
	20 x 20 cm	685 908	10 stk	6 AFP
HydroTac® transparent comfort Steril, pakket enkeltvis	6,5 x 10 cm	685 928	10 stk	8 AFP