

# Rolta® soft

Syntetisk polstervat

Kompression er mange gange en forudsætning for, at et sår kan hele. For at give en jævn kompression er det nødvendigt med en veludført polstring under kompressionsbindet. Da f.eks et ben hæver forskelligt, skal det "fyldes" ud således, at trykket fordeler sig jævnt. Som polstring kan man med fordel anvende polstervat. Rolta soft er et syntetisk polstervat, som føles både blødt og luftigt.



1 Blød og smidig

2 Let at afrive

3 Enkel at håndtere

### Fordele:

Blød og smidig  
Flere forskellige paknings-  
størrelser  
Let at afrive  
Behøver ikke at fjernes inden  
røntgenundersøgelser



### Egenskaber

Rolta soft er et maskinelt sammensat polstervat, som er enkel at håndtere, og som føles både blødt og luftigt ved anvendelse. Rolta soft er gennemtrængelig for luft og fugtighed og har ingen absorberende egenskaber, hvilket gør det hudvenligt. Rolta soft applikeres nemt i mindre forsænkninger og hulrum. Man kan applikere polstervattet både på langs og på tværs alt efter behov, og det afrides let efter brug. Rolta soft absorberer ikke røntgenstråler og behøver derfor ikke at fjernes inden røntgenundersøgelse.

### Indikation

Til polstring under kompressionsbind og gips.  
Kontraindikationer: Brugt ikke Rolta soft ved intolerance af materialet. Pas på, hvis patienten har nogen form af hudsygdom.

### Materiale

100% polyester. Rolta soft er sammensat maskinelt. Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, usteril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.  
Polstervattet kan steriliseres i autoklave ved 121°C i 20 minutter.

PAUL HARTMANN A/S  
Ørestads Boulevard 73  
2300 København  
T. 48 22 04 00  
F. 48 22 04 01  
E. info@dk.hartmann.info

[www.dk.hartmann.info](http://www.dk.hartmann.info)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Afp	Tfp
Rolta®soft	3 m x 6 cm	932 048	50 stk	1 Afp
Usteril, pakket i æske	3 m x 10 cm	932 049	30 stk	1 Afp
	3 m x 15 cm	932 050	20 stk	1 Afp
	3 m x 25 cm	932 051	10 stk	1 Afp
	3 m x 6 cm	932 043	6 stk	8 Afp
	3 m x 10 cm	932 045	6 stk	6 Afp
	3 m x 15 cm	932 047	4 stk	6 Afp