



Hydrofilm®

Transparent sårfilm

Hydrofilm er en steril selvklæbende transparent sårforbinding, der beskytter mod bakterier, ydre kontaminering samt mekanisk irritation og tørre sår. Hydrofilm har en høj brugerkomfort og filmen tilpasser sig kroppens konturer. Hudvenlig og enkel at håndtere.



1 Vandtæt og uigennemtrængelig for bakterier

2 Åndbar

3 Transparent



Helps. Cares. Protects.

Fordele:

Sikker sårbeskyttelse
Enkel håndtering
Høj brugerkomfort
Kan anvendes vid bad og brusebad
Transparent



Egenskaber

Takket være den tynde transparente film kan såret holdes under observation, uden at man behøver at skifte forbindingen. Denne egenskab gør, at man ikke behøver at forstyrre såret unødigt under helingsprocessen. Eftersom Hydrofilm holder både vand og bakterier ude, minimeres risikoen for sekundærinfektioner. Det er således også muligt at tage bad og brusebad. Hjørnerne på Hydrofilm er rundede, for at forbindingen skal blive siddende på plads. Anvendelsestiden afhænger af sårtypen og dets tilstand, kan sidde på plads op til 5 dage. Filmen har en meget tydelig fikseringsinstruktion. Ved at følge nummereringen fra 1-4 kan forbindingen fikseres på enkel vis. Filmforbindingen lader sig udmærket applikere med handsker på.

Materiale

Polyuretanfilm med hypoallergen klæber af akrylat. Kolofoniumfri. Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse IIa, steril. CE-mærket ifølge EU-forordning 2017/745 MDR.

Indikation

Anvendes som en steril selvklæbende transparent sårforbinding, der beskytter mod bakterier, ydre kontaminering samt mekanisk irritation og tørre sår. Bruges også som fiksering. F.eks. til kateter- og kanylefikseringer.

Kontraindikationer: Hydrofilm må ikke anvendes på inficerede, blødende eller væskende sår.

Fikseringsinstruktioner

Huden skal være tør, når filmen fikseres.

PAUL HARTMANN A/S
Ørestads Boulevard 73
2300 København
T. 48 22 04 00
F. 48 22 04 01
E. info@dk.hartmann.info

www.dk.hartmann.info
www.hartmann.info

| Sortiment | Størrelse | Varenr | Afp | Tfp |
|--|--------------|---------|---------|--------|
| Hydrofilm® Steril, pakket enkeltvis | 10 x 12,5 cm | 970 002 | 10 stk | 20 Afp |
| | 15 x 20 cm | 970 006 | 10 stk | 10 Afp |
| | 20 x 30 cm | 970 010 | 10 stk | 10 Afp |
| | 10 x 25 cm | 970 008 | 25 stk | 10 Afp |
| | 12 x 25 cm | 970 009 | 25 stk | 10 Afp |
| | 10 x 15 cm | 970 005 | 50 stk | 10 Afp |
| | 15 x 20 cm | 970 007 | 50 stk | 10 Afp |
| | 6 x 7 cm | 970 001 | 100 stk | 10 Afp |