

Pütter[®] Flex

Låglastisk kompressionsbinda med ökad komfort och rörlighet

Kompression är ofta en förutsättning för att ett sår skall kunna läka. Önskar man uppnå en kraftig kompression med högt arbetstryck och ett lågt vilotryck så kan man med fördel använda PütterFlex. Bindan är elastisk på både längd och bredd vilket har många fördelar, foten blir mer rörlig och man slipper "glipan" vid hälen.



- 1** Bindan släpper igenom luft vilket gör den bekväm att bära
- 2** Enkel att applicera och man slipper "glipan" vid hälen
- 3** Kan sitta på i upp till tre dagar

Fördelar:

Hög användarkomfort
Flexibel vid applicering
Släpper igenom luft
Latexfri



Egenskaper

Den flexibla vävstrukturen gör det möjligt att lägga en varaktig kompression. Eftersom en kortsträcksbinda dessutom anpassar sig efter benomfånget, kan man med fördel låta bindan sitta kvar i upp till 3 dagar även om ödemet eller svullnaden lägger sig. Skulle man däremot ha en extra kraftig svullnad finns det risk att bindan glider ner om svullanden reduceras drastiskt. Bindan har stretch åt båda hållen vilket ökar både rörligheten och komforten för användaren.

Material

100% bomull. Bindan är helt latexfri.
Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass 1, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.
Elasticitet längd: 90%
Elasticitet bredd: 40%

Indikation

Vid alla akuta och kroniska venösa ödem, venösa bensår och tromboflebit. Efter injektionsbehandling av åderbräck. Kontraindikationer: Arteriell okklusionssjukdom. Bensår med arteriellt ursprung. Används ej till sängliggande och rullstolsburna patienter. Endast till uppgående patienter eftersom det krävs muskelarbete för att förbättra det venösa återflödet och för att lindningen ska ha effekt.

Tvättråd

PütterFlex kan tvättas i 95°C och steriliseras i autoklave vid 134°C.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
F. 0371-58 74 45
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Pütter® Flex Styckförpackad i ask	5 m x 6 cm	931 827	1 st	40 Afp
	5 m x 8 cm	931 828	1 st	40 Afp
	5 m x 10 cm	931 829	1 st	40 Afp
	5 m x 12 cm	931 830	1 st	60 Afp
Lösa i ask	5 m x 8 cm	931 832	10 st	8 Afp
	5 m x 10 cm	931 833	10 st	8 Afp