



Hydrofilm®

Transparent sårfilm

Hydrofilm är ett sterilt självhäftande transparent sårförband som skyddar mot bakterier, yttre kontaminering samt mekanisk irritation och torra sår. Hydrofilm har en hög användarkomfort och filmen anpassar sig efter kroppens konturer. Hudvänlig och enkel att hantera.



1 Vattentät och ogenomtränglig för bakterier

2 Andas

3 Transparent

4 Rundade hörn



Helps. Cares. Protects.

Fördelar:

Säkert sårskydd
Enkel hantering
Hög användarkomfort
Kan användas vid dusch
Transparent



Egenskaper

Tack vare den tunna, transparenta filmen kan såret hållas under uppsikt utan att förbandet behöver bytas. Denna egenskap gör att såret inte behöver störas i onödan under läkningsprocessen. Eftersom Hydrofilm stänger ute både vatten och bakterier minimeras risken för sekundärinfektioner. Det fungerar också utmärkt att bära förbandet vid dusch. Hörnen på Hydrofilm är rundade för att förbandet ska sitta stadigt på plats under en längre tid. Förbandet kan sitta på upp till 5 dagar, det är dock sårets och hudens kondition som avgör användningstiden. Filmen har en mycket tydlig fixeringsinstruktion. Genom att följa numreringen från 1-4 så kan förbandet fixeras på ett enkelt sätt. Det går utmärkt att applicera filmförbandet med handskar på.

Material

Polyuretanfilm med hypoallergen häftmassa av akrylat. Kolofoniumfri. Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIa, steril. CE-märkt enligt EU-förordning 2017/745 MDR.

Indikation

Används som ett sterilt självhäftande transparent sårförband som skyddar mot bakterier, yttre kontaminering samt mekanisk irritation och torra sår. Används även som fixering av katetrar och kanyler. Kontraindikationer: Hydrofilm ska inte användas på infekterade, blödande eller vätskande sår.

Fixeringsinstruktioner

Huden måste vara torr vid fixering.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info

| Sortiment | Mått | Art.nr. | Afp | Tfp |
|---|--------------|---------|--------|--------|
| Hydrofilm® Steril, enstycksförpackad | 10 x 12,5 cm | 970 002 | 10 st | 20 Afp |
| | 15 x 20 cm | 970 006 | 10 st | 10 Afp |
| | 20 x 30 cm | 970 010 | 10 st | 10 Afp |
| | 10 x 25 cm | 970 008 | 25 st | 10 Afp |
| | 12 x 25 cm | 970 009 | 25 st | 10 Afp |
| | 10 x 15 cm | 970 005 | 50 st | 10 Afp |
| | 15 x 20 cm | 970 007 | 50 st | 10 Afp |
| | 6 x 7 cm | 970 001 | 100 st | 10 Afp |