


Atrauman® Ag

Barriereforsbinding som indeholder sølv

Atrauman Ag er en icke-vedhæftende barriereforsbinding som indeholder sølv med henblik på atraumatisk sårbehandling. Stoffets overflade og imprægnering modvirker adhæsion i såret, og forbindingen kan derfor skiftes atraumatisk.

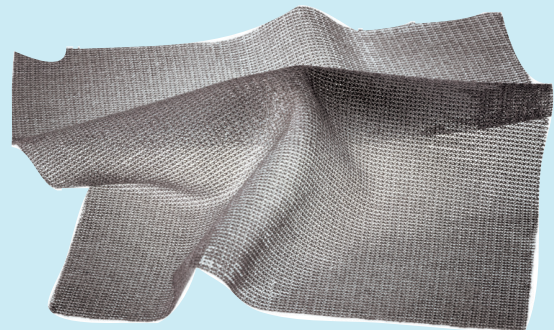

1 Ikke hæftende

2 Forhindrer maceration

3 Let at kombinere

Fordele:

Indeholder rent sølv
Blød og komfortabel
Økonomisk
Forhindrer maceration
Kan klippes til ønsket størrelse



Egenskaber

Det tynde og bløde materiale er let at aplikere og giver en god kontakt med sårområdet. Stoffets overflade og omprægning modvirker adhæsion i såret, og forbindingen kan derfor skiftes atraumatisk. Imprægningen beskytter sårrandene og er med til at forebygge maceration.

Materiale

Gitternet af polyamidfibre omgivet af elementært sølv. Imprægningen er ikke medicinafgivende og er triglyceridbaseret (neutrale lipider). Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse III, steril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

Indikation og applikering

Til behandling af ulcus cruris, diabetiske bensår og decubitus og desuden med akut indikation af forbrændinger op til anden grad. Atrauman Ag er skal kombineres med en egnet sekundær forbindelse, skumforbinding eller gaze.

Eftersom Atrauman Ag ikke fæstner mod huden, så kan det være svært at fiksere kompresset eksempelvis på undersiden af benet. Det nemmeste er først at lægge salvekompresset på sekundærforbindingen og derefter aplikere begge på såret.

Bestemte forsigtighedsforanstaltninger

Atrauman Ag må ikke anvendes i kombination med jodholdige eller paraffinholdige forbindelser eller salver.

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Afp	Tfp
Atrauman® Ag	5 x 5 cm	499 571	10 stk	12 Afp
Steril, pakket enkeltvis	10 x 10 cm	499 573	10 stk	12 Afp
	10 x 20 cm	499 575	10 stk	6 Afp