


# Atrauman® Ag

Barriärförband som innehåller silver

Atrauman Ag är ett icke-vidhäftande barriärförband som innehåller elementärt silver, för behandling av icke-traumatiska sår. Impregneringsmedlet motverkar vidhäftning och gör förbandsbytet enkelt och smärtfritt för patienten.

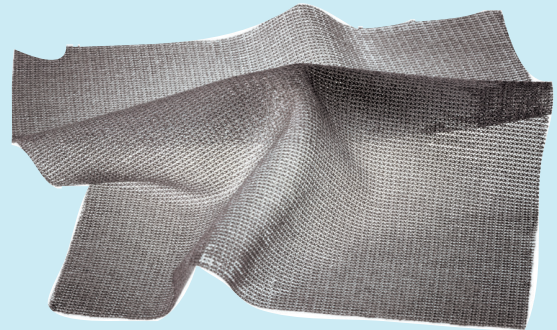

1 Icke vidhäftande

2 Motverkar maceration

3 Lätt att kombinera

## Fördelar:

- Innehåller elementärt silver
- Tunn och mjuk
- Kostnadseffektiv
- Motverkar maceration
- Kan klippas till önskad storlek



## Egenskaper

Det tunna och mjuka materialet är lätt att applicera och ger en bra kontakt över hela sårområdet. Textilytan och impregneringsmedlet verkar avstötande så förbandet inte fastnar i såret, och kan bytas utan att patienten upplever smärta. Impregneringsmedlet skyddar sårkanter och bidrar till att motverka maceration.

## Material

Polyamidfiber belagt med elementärt silver. Impregneringsmedlet är baserat på triglycerider (neutrallipider) och innehåller inga aktiva substanser. Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass III, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

## Indikation och applicering

För behandling av kroniska bensår, diabetessår och trycksår. Även lämpig vid akuta brännskador upp till andra graden. Atrauman Ag skall alltid kombineras med lämpligt förband ex. absorbenta eller superabsorbenta förband, skumförband eller gasväv.

Eftersom Atrauman Ag inte fäster mot huden kan det vara svårt att fixera den exempelvis på undersidan av benet. Enklaste sättet är att först lägga Atrauman Ag på det sekundära förbandet och därefter applicera båda mot såret.

## Särskilda försiktighetsåtgärder

Använd inte Atrauman Ag i kombination med sårförband eller salvor som innehåller jod eller paraffin.

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Atrauman® Ag	5 x 5 cm	499 571	10 st	12 Afp
Steril, enstycksförpackad	10 x 10 cm	499 573	10 st	12 Afp
	10 x 20 cm	499 575	10 st	6 AFP