


# Pütter<sup>®</sup>binde

Lågelastisk kompressionsbinda

Kompression är många gånger en förutsättning för att ett sår ska läka. För en kraftig kompression med högt arbetstryck och lågt vilotryck används med fördel Pütterbinde. Den kraftiga väven ger kompression även om svullnaden i benet minskar något i omfång.

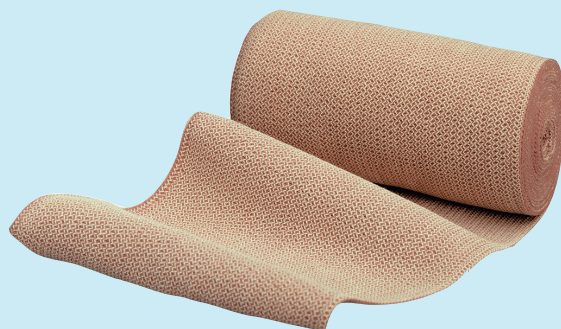

- 1** Ger kraftig kompression med högt arbetstryck och lågt vilotryck
- 2** Fungerar oberoende av vilken lindningsteknik du vill använda
- 3** Kan tvättas i 95°C

## Fördelar:

Märkt med tvättråd  
Märkt med produktnamn  
God hållbarhet  
Släpper igenom luft  
Latexfri



## Egenskaper

Den starka väv kvaliteten gör det möjligt att lägga utomordentligt hållbara förband med varaktig kompressionsverkan. Eftersom bindor med kort sträckbarhet dessutom anpassar sig bra till benomfångets förändringar när ödemen går tillbaka, kan de sitta kvar i ungefär 3 dagar utom vid för kraftiga svullnader där benets omfång minskar och bindorna riskerar att kasa ner.

## Material

100% bomull. Bindan är helt latexfri. Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC. Pütterbinde kan steriliseras i autoklav vid 134°C. Utsträckt längd: 5 m  
Outsträckt längd: ca 2,6 m  
Elasticitet: 90%

## Indikation och applicering

Vid alla akuta och kroniska venösa ödem, venösa bensår och tromboflebit. Efter injektionsbehandling av åderbräck. Kontraindikationer: Arteriell okklusionssjukdom. Bensår med arteriellt ursprung. Används ej till sängliggande och rullstolsburna patienter. Endast till uppegående patienter eftersom det krävs muskelarbete för att förbättra det venösa återflödet och för att lindningen ska ha effekt.

En lindningsinstruktion medföljer i alla förpackningar, men kan även beställas separat. Bästa tiden att linda är på morgonen. Polstra för bästa effekt. Uppmana patienten att röra på fötterna vid stillasittande.

## Tvättråd

Pütterbinde kan tvättas i 95°C upp till 15 gånger. För att göra bindans livslängd så lång som möjligt ska den torkas plant efter tvätt, och lindas hårt när den inte används. Alla bindor är märkta med tvättråd och produktnamn i båda ändar.



Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Pütter®binde lösa i ask	5 m x 6 cm	931 806	10 st	8 Afp
	5 m x 8 cm	931 814	10 st	8 Afp
	5 m x 10 cm	931 815	10 st	8 Afp
	5 m x 12 cm	931 816	10 st	8 Afp