

# Pütter<sup>®</sup> Pro 2 Lite

2-lags kompressionssystem med visuel indikator

2-lags kompressionssystem til en kompressionsbehandling der kræver reduceret kompression. Begge bind er latexfri, hudvenlige og tillader huden at ånde. Efter applikering kan begge bind nemt rives over uden brug af saks. Begge bindene er markeret med en visuel indikator hvilket er en hjælp til anlæggelse af forbindingen for at opnå en behandlingsmæssig effektiv kompression.



- 1 Visuel indikator for hjælp till rett kompression
- 2 Begge bind kan let tages af med hænderne
- 3 Kan sidde på i op til 7 dage
- 4 ABPI 0,6-0,8

## Fordele:

Effektiv kompression  
Visuel indikator  
Tyndt og bekvemt  
Kan sidde i op til 7 dage  
Latexfri

## Egenskaber

2-lags kompressionssystem bestående af et kortstræks-polsterbind med en latexfri, kohæsitiv belægning på den ene side og et langstræks-kompressionsbind med latexfri kohæsitiv belægning på begge sider, for at bindene skal kunne sidde sikkert uden at glide. Den visuelle indikator er en hjælp til anlæggelse af forbindningen for at opnå en behandlingsmæssig effektiv kompression. Bindene er lette at applicere og sidder sikkert i op til 7 dage.

## Materiale

Polsterbindet består af 92% polyester og 8 % elasthan med latexfri belægning på den ene side.

Elasticitet er ca. 55%.

Kompressionsbindet består af 85% polypropylen og 15% elasthan med latexfri belægning på begge sider.

Elasticitet er ca. 150%

Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, usteril. CE-mærket ifølge EU-forordning 2017/745 MDR.

## Indikation

Til kompressionsbehandling, hvor der er behov for et reduceret kompressionsniveau (ABPI 0,6-0,8) eller til patienter der ikke kan tåle fuld kompression. Til behandling af:

- Blandet ætiologi (arterielle-venøse) åbne sår på benet
- Venøse åbne sår på benet
- Ødem
- Thromboses/thromboplebitis

PütterPro 2 Lite må ikke anvendes i tilfælde af:

- Fremskreden periferokklusiv arteriel sygdom (PAOD) med kritisk iskæmi
- Dekompenseret hjerteinsufficiens
- Phlegmasia coerulea dolens
- Ankel-brakial-indeks <0,6
- Septisk flebitis
- Florid erysipelas (rosen)

## Applikering

Instruktion for anlæggelse er inkluderet i hver produktpakke.

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Afp	Tfp
PütterPro 2 Lite	10 cm x 6,5 m	332 017	1 sæt	12 Afp
1 sæt i æske	10 cm x 8,2 m			