


Atrauman®

Salvekompres

Ved forbindingskift er der en risiko for, at sårfladen rives op igen og igen. Dette forårsager smerte, som kan føre til en uvilje hos patienten mod at få skiftet forbinding. For at hindre dette anvendes Atrauman salvekompres, som kan kombineres med flere forskellige forbindingstyper for at undgå fastvoksning i såret. Atrauman indeholder triglycerider, som beskytter såret mod udtørring samt forhindrer skorpedannelse. Gennem sit finmaskede net tillader salvekompresset væske at trænge igennem fra såret og op i den sekundære forbinding.

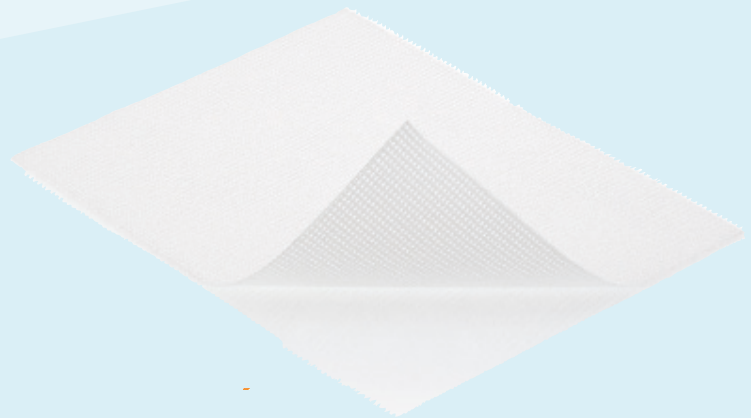

1 Mange anvendelsesområder

2 Forhindrer fastvoksning

3 Beskytter sårkanterne

Fordele:

Ingen risiko for fastvoksning
Blød og komfortabel
Økonomisk
Beskytter såret
Mange anvendelsesområder
Plejer sårkanterne



Egenskaber

Det tynde, bløde gittervæv af hydrofobe polyesterfibrer har en glat yderstruktur, som forhindrer, at nydannet væv vokser ind i kompresset. Således modvirkes tendensen til fastvoksning i såret. Ingen salverester efterlades i såret, hvilket letter rensningen og vurderingen af sårets tilstand. Atrauman holder sårfladen og sårkanterne smidige og beskytter såret mod udtørring. Salvemassen er gennemtrængelig for både luft og sekreter, hvilket sikrer, at overskydende sekret hurtigt ledes bort fra såret. For at absorbere overskydende sekret bør der lægges en absorptionsforbinding i kombination med Atrauman. Da salvemassen er helt neutral uden brug af aktive lægemidler, kan kompresset endda også benyttes indenfor dermatologien, samt til patienter, der lider af overfølsomhed overfor lægemidler eller af sensibel hud. Efter lægeordination kan terapeutisk virksomme salver tilsættes. Atrauman bør skiftes ved hvert forbindingskift, såfremt lægen ikke ordinerer andet.

Materiale

Hydrofobt polyestergittervæv, imprægneret med en neutral salvemasse. Salven indeholder: Fedtsyrer(triglycerider). **Salven er ikke sensibiliserende og indeholder hverken vaseline, lanolin eller parafin.**

Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, usteril. CE-mærket ifølge EU-forordning 2017/745 MDR.

Indikation og applikering

Til atraumatisk sårbehandling i alle faser af sårhelingen ved f.eks. hudafskrabninger, bensår, tryksår, mindre forbrændinger, strålingskader, abscesser, hudtransplantationer og ved negleekstraktioner.

Kontraindikationer: Ingen kendte.

Da Atrauman ikke hæfter på huden, så kan det være vanskeligt at fiksere kompresset f.eks. på undersiden af benet. Det nemmeste er derfor først at lægge salvekompresset på sekundærforbindingen og derefter applikere begge på såret. Hvis der ikke er behov for en sekundær forbinding, så kan salvekompresset evt. fikseres med et gazebind.

PAUL HARTMANN A/S
Ørestads Boulevard 73
2300 København
T. 48 22 04 00
F. 48 22 04 01
E. info@dk.hartmann.info

www.dk.hartmann.info
www.hartmann.info

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Afp	Tfp
Atrauman®	5 x 5 cm	499 510	10 stk	40 Afp
Steril, pakket enkeltvis	7,5 x 10 cm	499 513	10 stk	20 Afp
	20 x 30 cm	499 515	10 stk	3 Afp
	10 x 20 cm	499 536	30 stk	5 Afp
	5 x 5 cm	499 550	50 stk	16 Afp
	7,5 x 10 cm	499 553	50 stk	8 Afp