

# Veroval®

HARTMANN



Bloeddruk | ECG | Gewicht  
Activiteit | Zelftests

## Neem uw gezondheid ter harte.

Met de meetapparaten en zelftests van Veroval® kunt u uw arts ondersteunen en actief iets voor uw gezondheid doen. Nauwkeurig. Betrouwbaar. Eenvoudig.



Met korte gebruiksaanwijzing bij Veroval® medi.connect



# Veroval®



BLOEDDRUK



ECG | BLOEDDRUK



WEEGSCHAAL



ACTIVITEIT

## Verantwoord omgaan met uw gezondheid.

Door uw vitale functies te controleren en een gezonde leefstijl aan te houden, kunnen problemen bijtijds worden herkend en voorkomen. Regelmatig meten van de bloeddruk helpt bijvoorbeeld om beroertes en hartaandoeningen te voorkomen en de behandeling van de arts te ondersteunen.

Met **Veroval®** en de gratis **Veroval® medi.connect software** is de meting van uw vitale functies in goede handen. Alle apparaten en zelftests leveren snel en eenvoudig betrouwbare resultaten. De resultaten kunnen via de software worden opgeslagen op de pc, grafisch worden weergegeven en met uw arts worden gedeeld.



# BLOEDDRUK

## Bovenarmbloeddrukmeter voor nauwkeurige en comfortabele meting

- ✓ Volautomatische bloeddrukmeting met hoge meetnauwkeurigheid
- ✓ Eenvoudige, intuïtieve bediening
- ✓ Groot display voor gemakkelijk aflezen van de gemeten waarden
- ✓ Herkent en toont hartritestoornissen (aritmie)
- ✓ Eenvoudig meetwaarden analyseren met behulp van verkeerslichtsysteem
- ✓ Comfortabele, universele manchet met ergonomische pasvorm
- ✓ Met geïntegreerde controle van manchetbevestiging
- ✓ Eenvoudig opslaan van de gegevens met de Veroval® medi.connect software
- ✓ Gegevens compatibel met alle Veroval®-apparaten, zoals de weegschaal en activiteitsarmband
- ✓ USB-kabel inbegrepen



## Polsbloeddrukmeter voor eenvoudig en snel meten

- ✓ Volautomatische bloeddrukmeting met hoge meetnauwkeurigheid
- ✓ Eenvoudige, intuïtieve bediening
- ✓ Groot display voor gemakkelijk aflezen van de gemeten waarden
- ✓ Herkent en toont hartritestoornissen (aritmie)
- ✓ Eenvoudig meetwaarden analyseren met behulp van verkeerslichtsysteem
- ✓ Met optische positiecontrole om de juiste meetpositie op harthoogte te bepalen
- ✓ Eenvoudig opslaan van de gegevens met de Veroval® medi.connect software
- ✓ Gegevens compatibel met alle Veroval®-apparaten, zoals de weegschaal en activiteitsarmband
- ✓ USB-kabel inbegrepen



## 2-in-1 combi-apparaat:

Dragbare monitor voor controle van het hartritme (ECG) en bloeddrukmeting

### Draagbare

#### ECG-functionaliteit:

- ✓ Herkent boezemfibrilleren, een belangrijke oorzaak van beroertes
- ✓ Voor opname van het hartritme in 30 seconden - altijd en overal
- ✓ Herkent hartritmestoornissen, zoals extrasystolen, een vroeg teken van bloedsomloopstoornissen en ontstekingen van de hartspier
- ✓ Directe, gemakkelijk te begrijpen resultaatweergave + detailweergave (elektrocardiogram) voor de arts

### Volautomatische

#### bloeddrukmeetfunctie:

- ✓ Voor comfortabele en nauwkeurige meting aan de bovenarm
- ✓ Hoge meetnauwkeurigheid
- ✓ Comfortabele, universele manchet met ergonomische pasvorm
- ✓ Eenvoudig meetwaarden analyseren met behulp van verkeerslichtsysteem
- ✓ Eenvoudig opslaan van de gegevens met de software Veroval® medi.connect

- ✓ Gegevens compatibel met alle Veroval®-apparaten, zoals de weegschaal en activiteitsarmband
- ✓ Bluetooth USB-adapter inbegrepen



## ACTIVITEIT

### Intelligente armband voor specifieke bewegingsanalyse


- ✓ Afzonderlijk te kiezen activiteiten: wandelen en hardlopen, maar ook zwemmen en fietsen (met stopwatchfunctie en gekoppelde calorieënweergave)
- ✓ Met geïntegreerde hartslagmeting om de pols en stappenteller
- ✓ Registratie van het calorieënverbruik, duur van de activiteit en de afstand
- ✓ Uitgebreide slaapanalyse
- ✓ Individueel in te stellen en in te voeren dagdoel
- ✓ Tot op 30 meter diepte waterdicht
- ✓ Eenvoudig opslaan van gegevens
  - met de app Veroval® medi.connect voor Android- en iOS-smartphones
  - met de software Veroval® medi.connect op de pc
- ✓ Gegevens compatibel met alle Veroval®-apparaten, zoals de weegschaal en bloeddrukmeters
- ✓ Gegevensoverdracht via Bluetooth (op smartphone-app) of Bluetooth USB-adapter (op pc)
- ✓ Bluetooth USB-adapter inbegrepen



## WEEGSCHAAL

### Intelligente personenweegschaal voor optimale gewichts- en lichaamsanalyse

- ✓ Afneembaar scherm met draadloze verbinding en uitklapbare standaard
  - ✓ Bepaalt automatisch calorieënbehoefte en ideaal gewicht
  - ✓ Gebruikersgeheugen voor 4 personen
  - ✓ Berekent en analyseert:
    - gewicht
    - BMI
    - percentage lichaamsvet
    - spierpercentage
    - botmassa
    - percentage lichaamsvocht
  - ✓ Eenvoudig opslaan van de gegevens met de Veroval® medi.connect software
- ✓ Gegevens compatibel met alle Veroval®-apparaten, zoals bloeddrukmeters en activiteitsarmband
  - ✓ USB-kabel inbegrepen

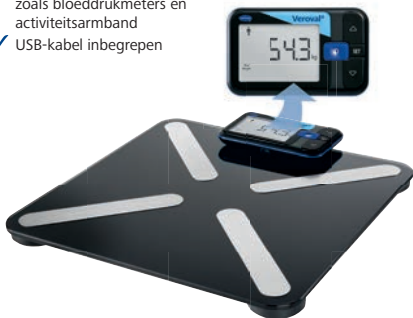

# Veroval® medi.connect: Uw vitale meetwaarden in één klik

Koppel gegevens uit verschillende bronnen aan elkaar en analyseer de verbanden.

- ✓ Maak een keuze uit **verschillende analyseperioden**: dag, week, maand
- ✓ De software maakt uw gegevens **automatisch** klaar voor **grafische** weergave

Zo begint u:

- ✓ Download gratis vanaf [www.veroval.info](http://www.veroval.info) de software en sla deze op uw pc op (Compatibel met Windows 7, 8 en 10, indien nog officieel door Microsoft ondersteund)
- ✓ Een andere mogelijkheid is, dat u de app of de webtoegang via [www.veroval.nl](http://www.veroval.nl) gebruikt
- ✓ Start de software Veroval® medi.connect
- ✓ Sluit uw Veroval®-apparaat door middel van de meegeleverde USB-kabel op de pc aan
- ✓ Registreer u als gebruiker
- ✓ Kies uw apparaat en draag uw meetresultaten over



## Activiteit




Deel uw gezondheidsgegevens via een afdruk, e-mail of de gastmodus – bijvoorbeeld bij het volgende bezoek aan de arts, met een apotheker of met familieleden.




Om gegevens op te halen wanneer u onderweg bent, gebruikt u de app of de webtoegang op [www.veroval.nl](http://www.veroval.nl)


### Stappen

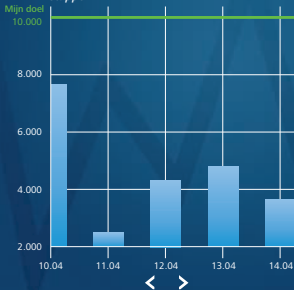

## Bloeddruk

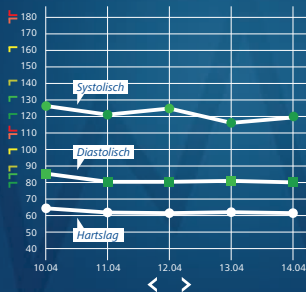

## Gewicht

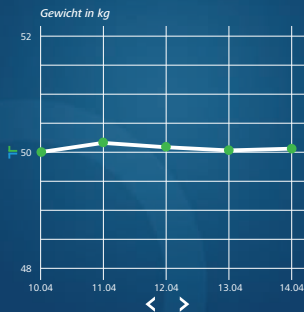

**PAUL HARTMANN B.V.**

Kerkenbos 11 - 03d  
6546 BC Nijmegen

 (024) 711 20 00

 (024) 377 82 84

 [www.paulhartmann.nl](http://www.paulhartmann.nl)  
[www.hartmann-academie.nl](http://www.hartmann-academie.nl)

 [info@paulhartmann.nl](mailto:info@paulhartmann.nl)



**Going further  
for health**