



HARTMANN

## **Grassolind neutral** **Pansament impregnat cu parafină**

### **Instrucțiuni de utilizare**

Grassolind neutru este un pansament nemedicamentos cu parafină, indicat în tratamentul plăgilor (rănilor).

### **Compoziție**

Tul (țesătură tip plasă) din bumbac impregnat cu substanță grasă, anhidră, ce conține vaselină albă, ester diglicerol al acidului dicarboxilic și monocarboxilic, parafină.

### **Proprietăți**

Tul-ul permite trecerea exsudatului prin ochiurile rețelei sale în pansamentul absorbant de deasupra, prevenind macerația.

Substanța grasă păstrează marginile plăgii suple, stimulând formarea țesutului de granulație și epitelizarea, și prevenind aderarea pansamentului de plagă. Pansamentul poate fi schimbat fără durere și fără să distrugă țesutul de granulație și epiteliul nou format.

### **Indicații**

Pentru tratamentul general al plăgilor, în special pentru plăgile exsudative (abraziuni, dilacerări, plăgi tăiate, arsuri cu lichide fierbinți, arsuri acide, pentru acoperirea site-ului donor sau acceptor în grefele de piele, chirurgia cosmetică și plastică, extracția de unghii, circumcizii etc.).

Datorită proprietăților neutre ale substanței grase nemedicamentoase de bază, pansamentul Grassolind este indicat în mod particular în dermatologie, la pacienții cu piele sensibilă și la alergici.

### **Mod de aplicare**

Scoateți pansamentul din ambalajul steril păstrând ambele folii protectoare aplicate.

Tăiați-l la dimensiunea plăgii, dacă este necesar.

După îndepărtarea uneia din foliile protectoare, aplicați pansamentul pe plagă, apoi îndepărtați cealaltă folie protectoare.

Pentru absorbția exsudatului plăgii se recomandă aplicarea unui pansament steril absorbant peste Grassolind.

În afară de cazul în care există o recomandare a medicului, Grassolind se schimbă ori de câte ori se pansează.

### **Contraindicații și efecte adverse**

Nu au fost observate efecte adverse.

### **Instrucțiuni generale**

Conținut steril, dacă ambalajul nu este deteriorat.  
Depozitare la temperatura camerei (nu mai mult de 30°), în locuri uscate. A nu se resteriliza. A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

### **Prezentare**

Ambalaj steril, individual, în folie de aliminiu.

7,5x10cm

cutie cu 10 pansamente

10x10cm

cutie cu 10 pansamente

10x20cm

cutie cu 30 pansamente

### **Producător**

PAUL HARTMANN AG

89522 — Heidenheim

Germania

### **Importator**

SC PAUL HARTMANN SRL

Str. Arany Janos nr 46, etaj 1

RO-540 045 Târgu Mureș

România