



Hydrocoll Pansament hidrocoloidal

Instrucțiuni de utilizare

Hydrocoll este un pansament hidrocoloidal, absorbant, autoadeziv, cu un strat extern din poliuretan care este permeabil pentru gaze și impermeabil pentru lichide și bacterii.

Proprietăți și mod de acțiune

Hidrocoloidul absoarbe exsudatul din plagă (rană) transformându-l în gel, astfel asigurând un mediu umed ce stimulează procesele de vindecare. Stratul de gel previne aderarea pansamentului de plagă. Schimbul pansamentului nu afectează țesutul de granulație sau țesutul epitelial și nu creează disconfort pentru pacient.

Marginile autoadezive ale Hydrocoll asigură o fixare bună pe orice tip de suprafață. Hydrocoll permite igiena personală zilnică.

Indicații

Hydrocoll este indicat în tratamentul plăgilor cu exsudat minim până la moderat.

Mod de aplicare

Alegeți dimensiunea și forma corectă de Hydrocoll. Pansamentul trebuie să depășească cu câțiva centimetri marginile plăgii pentru a se fixa sigur pe plagă.

Hydrocoll/ Hydrocoll thin: îndepărtați hârtia protectoare, aplicați Hydrocoll pe plagă, potriviți marginile și presați-le pentru o fixare bună.

Hydrocoll trebuie schimbat la decolorarea vizibilă a pansamentului și formarea unei vezicule de mărimea suprafeței plăgii. Pentru a schimba pansamentul, dezlipiți marginile Hydrocoll și îndepărtați cu grijă întregul pansament. Pe plagă rămâne un strat de gel hidrocoloidal ce nu trebuie confundat cu puroiul. În acest caz, vindecarea plăgii nu este afectată, stratul de gel putând fi îndepărtat, dacă este necesar.

În cazul plăgilor necomplicate, Hydrocoll poate fi lăsat pe plagă până la 7 zile.

Contraindicații

Nu utilizați Hydrocoll în escarele profunde cu extindere musculară, tendinoasă sau osoasă, pe plăgi infectate sau în cazul arsurilor de gradul III.

Precauții speciale

Hydrocoll poate fi eficient numai după o evaluare medicală a pacientului și a stării plăgii. Tratamentul cu Hydrocoll nu poate înlocui tratamentul afecțiunii de bază care a condus la cronicizarea plăgii.

Instrucțiuni generale

A se depozita la temperaturi sub 30° C. Conținut steril - dacă ambalajul nu este deteriorat. A nu se resteriliza. A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

Forme de prezentare

Ambalat steril, individual.

Hydrocoll

5 x 5cm

7,5 x 7,5cm

10 x 10cm

15 x 15cm

20 x 20cm

Concave, 8 x 12 cm

Hydrocoll thin

10 x 10cm

cutii cu 10 pansamente

cutii cu 10 pansamente

cutii cu 10 pansamente

cutii cu 5 pansamente

cutii cu 5 pansamente

cutii cu 10 pansamente

cutii cu 10 pansamente

Producător

PAUL HARTMANN AG

89522 – Heidenheim

Germania

Importator

SC PAUL HARTMANN SRL

Str. Arany Janos nr 46, etaj 1

RO-540 045 Târgu Mureș

România