



HARTMANN

Hydro Tac, pansament din spumă poliuretanică, cu strat de hidrogel

Instrucțiuni de utilizare

HydroTac este un pansament din spumă poliuretanică permeabil pentru gaze dar impermeabil pentru fluide și germeni. Stratul de contact cu plaga (rana) este impregnat cu hidrogel. Hidrogelul este constituit dintr-un polimer hibrid de poliuree cu poliuretan, ce conține polipropilen glicol.

HydroTac comfort prezintă suplimentar margini autoadezive.

Proprietăți și mod de acțiune

HydroTac absoarbe exsudatul în exces și menține mediul umed, stimulând procesul de vindecare al plăgii. Stratul de gel aflat în contact cu plaga împiedică lipirea pansamentului și permite schimbarea acestuia fără durere și fără a lăsa reziduuri în plagă.

Indicații

HydroTac este indicat în tratamentul plăgilor cu exsudat scăzut până la moderat în faza de granulație și epitelizare.

Mod de aplicare

Selectați mărimea pansamentului HydroTac astfel încât pansamentul să depășească marginile plăgii cu cca. 1-2 cm. HydroTac poate fi tăiat la dimensiunea corespunzătoare cu o foarfecă sterilă.

Se îndepărtează folia transparentă protectoare marcată cu pașii 1,2,3 și 4 astfel urmărind pașii 1 și 2, se aplică pansamentul cu stratul impregnat cu gel pe plagă. Proprietățile autoadezive ale pansamentului HydroTac fac pansamentul ușor de aplicat.

Pansamentul necesită fixare secundară cu plasture sau fașă de fixare (Omnifix elastic, Peha-haft).

HydroTac comfort: se îndepărtează folia transparentă protectoare urmărind pașii 1 și 2, se aplică pansamentul cu stratul impregnat cu gel pe plagă și se presează marginile adezive (atenție! nu aplicați presiune direct pe plagă). Se îndepărtează folia protectoare superioară urmărind pașii 3 și 4.

HydroTac se poate folosi în plăgile fisurate sau profunde, în combinație cu Hydrosorb gel sau Sorbalgon.

Schimbul pansamentului se realizează ori de câte ori este indicat de starea clinică sau când exsudatul devine vizibil pe marginile pansamentului.

Contraindicații

HydroTac nu trebuie folosit la pacienții alergici la unul din componentele sale.

Precauții speciale

Înainte de a trata o plagă cu tendință cronică (vindecare întârziată) trebuie efectuată mai întâi o evaluare medicală a plăgii și stabilită cauza evoluției cronice a plăgii.

Tratamentul cu HydroTac nu poate înlocui tratamentul cauzei bolii de bază (vindecarea întârziată a plăgii). În cazul plăgilor infectate, cu expunere osoasă sau de tendoane, HydroTac poate fi folosit numai sub observația medicului curant.

HydroTac poate fi folosit în arsurile de gradul II și III numai cu supervizarea medicului curant și numai după debridarea țesutului necrotic sau tratament chirurgical.

A nu se folosi HydroTac în combinație cu substanțe oxidante precum soluție hypoclorită sau hidrogen peroxid! Acestea pot ataca pansamentul!

Instrucțiuni generale

Depozitare la temperatura camerei (nu mai mult de 40° C), în locuri uscate.

Conținut steril - dacă ambalajul nu este deteriorat.

A nu se resteriliza.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

Forme de prezentare

Ambalat steril, individual.

HydroTac

Ø 6cm

10 x 10cm

10 x 20cm

cutie cu 10 pansamente

cutie cu 10 pansamente

cutie cu 3 pansamente

HydroTac Comfort

8 x 8cm

12,5 x 12,5cm

20 x 20cm

cutie cu 10 pansamente

cutie cu 10 pansamente

cutie cu 3 pansamente

Producător

PAUL HARTMANN AG


89522 — Heidenheim

Germania

Importator

SC PAUL HARTMANN SRL
Str. Arany Janos nr 46, etaj 1
RO-540 045 Târgu Mureș
România

Modalități de utilizare HydroTac

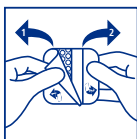

HydroTac Comfort

