



Korsolex[®] extra

Aldehydisches Desinfektionsmittel für thermolabile und -stabile Instrumente.



Produkteigenschaften

- Breites Wirkungsspektrum, inkl. Viruzidie
- Hervorragende Materialverträglichkeit
- Wirtschaftliche Einsatzkonzentrationen
- Angenehmer Geruch
- wirksam gegenüber *C. difficile* Sporen

Anwendungsgebiete

Korsolex[®] extra^{a)} ist ein Aldehyd-/QAV-basiertes Desinfektionsmittelkonzentrat mit umfassendem Wirkspektrum zur manuellen Aufbereitung von Medizinprodukten, inklusive flexibler Endoskope.

Anwendung

Grundsätzlich muss vor der Anwendung von Korsolex[®] extra eine Reinigung, bspw. mit Bodedex[®] forte^{b)}, zur Entfernung organischer Rückstände erfolgen. Die Lösung stets mit kaltem Wasser (max. Raumtemperatur) ansetzen.

• Tauchbadverfahren

Dosierungsempfehlungen und Einwirkzeiten siehe Tabelle Wirksamkeiten. Alle Oberflächen und Hohlräume müssen vollständig mit Desinfektionslösung benetzt sein.

• Zirkulationsverfahren

Kann für alle gängigen Zirkulationsverfahren, die mit kaltem Wasser arbeiten, eingesetzt werden. Das Konzentrat wird entsprechend den Empfehlungen der Gerätehersteller angeschlossen.

Wirksamkeit	Prüfmethode (geringe Belastung)	Einwirkzeit					
		5 Min.	15 Min.	30 Min.	1 Std.	2 Std.	4 Std.
Bakterien / Pilze							
Bakterizidie / Levurozidie	EN 14561 / EN 14562		0,75 %	0,5 %	0,25 %		
Bakterizidie / Levurozidie	VAH		1,0 %	0,75 %	0,5 %		
Fungizidie	EN 14562		5,0 %	5,0 %	3,0 %		
Fungizidie	VAH		4,0 %	3,0 %	2,0 %		
Tuberkulozidie	EN 14563 / EN 14348		5,0 %	3,0 %	2,0 %		
Tuberkulozidie	VAH		3,0 %	2,5 %	1,5 %		
Mykobakterizidie	EN 14563 / EN 14348		5,0 %	3,0 %	2,0 %		
Mykobakterizidie	VAH		4,0 %	2,5 %	1,5 %		
Bakteriensporen							
<i>C. difficile</i>	EN 17126					10,0 %	5,0 %
Viren							
Begrenzte Viruzidie (inkl. HBV, HIV, HCV)	DVV	1,0 %					
Viruzidie	EN 14476 / EN 17111		4,0 %	3,0 %	2,0 %		
Viruzidie	DVV		2,0 %				

Nach der Desinfektion gründlich Abspülen bzw. Wässern und Trocknen der Instrumente. Das Wasser sollte mindestens Trinkwasserqualität besitzen. Vollentsalztes Wasser ist für hochwertiges Instrumentarium empfehlenswert.

Zur Oberflächendesinfektion von nicht einlegbaren Medizinprodukten

Anwendung von Korsolex extra in Kombination mit dem BODE X-Wipes Safety Pack^{b)} zur Oberflächendesinfektion von nicht einlegbaren Medizinprodukten.

Korsolex® extra



Für nicht oder nicht vollständig einlegbare Medizinprodukte wie Ultraschallköpfe, TEE-Sonden und andere Sonden. Hierfür ist folgendes Vorgehen einzuhalten:

Entfernen möglicher Kontaktgele z. B. mit einem trockenen Zellstofftuch
Gründliches Abwischen der Flächen mit einem Korsolex® extra getränktem BODE X-Wipes Safety Pack Vliestuch.
Anschließend die Einwirkzeit abwarten (Oberfläche trocknet ab).

Entfernung möglicher Produktreste nach Ablauf der Einwirkzeit. Hierfür Wasser von mind. Trinkwasserqualität verwenden.

Einsatzkonzentration und Einwirkzeiten siehe Wirksamkeiten.

Materialverträglichkeit

Hohe Materialverträglichkeit gegenüber Endoskopen und verschiedenen Werkstoffen, wie z. B. Glas, Keramik, Edelstahl, Buntmetalle, Aluminium, Kunststoff, Hartplastik, Silikon, Gummi, Hartgummi, Acrylglas (PMMA), Polycarbonat (PC), Latex und Porzellan.

Mikrobiologie

Bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, wirksam gegenüber *C. difficile*, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), viruzid.

Kompatibilität

Kompatibel mit dem Korsolex® Endo-System zur chemothermischen Endoskopaufbereitung.

Vor dem Einsatz von Korsolex® extra dürfen keine aminhaltigen Desinfektionsmittel verwendet werden, da eine Inkompatibilität besteht.

Zusammensetzung

100 g Konzentrat enthalten:
(Ethyldioxy)dimethanol 15,3 g; Glutaral 7,5 g; Benzyl-C12-18-alkyldimethylammonium chloride 1,0 g; Didecyldimethylammoniumchlorid 1,0 g;

Listung

VAH, IHO-Desinfektionsmittelliste.

Chemisch-physikalische Daten

Aussehen	blaue, klare Flüssigkeit
pH-Wert Konzentrat	ca. 4
2 %ige Lösung	ca. 6
3 %ige Lösung	ca. 6
Dichte (20 °C)	ca. 1,04 g/cm ³

Standzeiten

Die Standzeit der Gebrauchslösung beträgt 1 Tag. Bei Verwendung dem BODE X-Wipes Safety Pack beträgt die Standzeit 28 Tage.

Produktname	Packungsinhalt	Artikelnummer	PZN	Versand-Einh. Packungen
Korsolex® extra	2 Liter Flasche	980 254	2627602	4

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. im Hinblick auf Materialverträglichkeit, sind nur im Einzelfall gesondert möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusage. Sie schließen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke nicht aus. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. Diese richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

(a)  (b) 



Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN Ges.m.b.H.
2355 Wiener Neudorf
Österreich

Telefon +43 2236 64630-0
office@at.hartmann.info
www.at.hartmann.info

