

Cosmopor® Transparent

Transparent sårfilm med absorptionsdyna

Cosmopor Transparent är ett självhäftande, transparent filmförband tillverkat av en semipermeabel, vattentät och transparent polyuretanfilm belagd med ett polyakrylatlim och med en absorberande sårdyna i mitten.

Sårdynan är gjord av viskosfibrer och täckt med polyetenmesh som fungerar som ett icke-vidhäftande sårkontaktskikt.



1 Vattentät och ogenomtränglig för bakterier

2 Andas

3 Absorberande sårdyna

Fördelar:

Säkert sårskydd
Enkel hantering
Hög användarkomfort
Duschbar



Egenskaper

Cosmopor Transparent är ett icke-invasivt, självhäftande, transparent filmförband för engångsbruk. Sårdynan absorberar och håller kvar exsudatet. Filmen underlättar fri passage av vattenånga och gaser och är vattentät. Det fungerar utmärkt att bära förbandet vid dusch. Produkten kan sitta på plats upp till 5 dagar. Medicinsk bedömning av sårets tillstånd rekommenderas dock som underlag för beslut om förbandet behöver bytas ut.

Ett nytt förband kan appliceras omgående.
Total användningstid får inte överstiga 30 dagar.

Material

Semipermeabel polyuretanfilm med hypoallergen häftmassa av akrylat. Absorptionsdyna av viskosfibrer täckt med ett polyetylennät. Kolofoniumfri. Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIa, steril. CE-märkt enligt EU-förordningen 2017/745 MDR.

Avsedd användning

Cosmopor Transparent kan användas för postoperativ vård av alla lätt exuderande sår, för skydd mot bakteriell penetration och för användning som ett sterilt förband vid mindre skador.

Cosmopor Transparent skall inte användas på kliniskt infekterade, kraftigt blödande eller exuderande sår eller mot trycksår.

Fixeringsinstruktioner

Huden måste vara torr vid fixering.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info

Sortiment	Mått	Sårdyna	Art.nr.	Afp	Tfp
Cosmopor [®] Transparent Steril, enstycksförpackad	5 x 7,2 cm	2,5 x 4 cm	901 051	50 st	10 Afp
	9 x 10 cm	4 x 6 cm	901 053	50 st	10 Afp
	9 x 15 cm	4 x 11 cm	901 055	25 st	10 Afp
	10 x 12 cm	5 x 8 cm	901 056	25 st	10 Afp
	10 x 20 cm	5 x 16 cm	901 058	25 st	10 Afp
	10 x 25 cm	5 x 20 cm	901 059	25 st	10 Afp
	10 x 30 cm	5 x 25 cm	901 060	25 st	10 Afp