

Cosmopor® Transparent

Transparent sårfilm med absorptionspude

Cosmopor Transparent er en selvklæbende, transparent filmforbinding fremstillet af en semipermeabel, vandtæt og transparent polyurethanfilm belagt med en polyacrylatklæber og med en absorberende sårpude i midten.

Sårpuden er lavet af viskosefibre og dækket med polyethylenet, der fungerer som en ikke-klæbende sårkontaktlag.



- 1 Vandtæt og uigennemtrængelig for bakterier
- 2 Åndbar

- 3 Absorberende sårpude

Fordele:

Sikker sårbeskyttelse
 Enkel håndtering
 Høj brugerkomfort
 Brusebar



Egenskaber

Cosmopor Transparent er en ikke-invasiv, selvklæbende, transparent filmforbinding til engangsbrug. Sårpuden absorberer og fastholder ekssudatet. Filmen letter den frie passage af vanddamp og gasser og er vandtæt. Det fungerer fantastisk at have Cosmopor Transparent på under brusebad. Kan sidde på plads up til 5 dage. Medicinsk vurdering af sårets tilstand anbefales dog som grundlag for at tage stilling til, om forbindingen skal udskiftes. En ny forbinding kan påføres med det samme. Samlet brugstid må ikke overstige 30 dage.

Materiale

Semipermeabel polyuretanfilm med hypoallergen klæber af akrylat. Absorptionspude af viskosefibrer dækket med et polyetylenet. Kolofoniumfri. Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse IIa, steril. CE-mærket ifølge EU-forordning 2017/745 MDR.

Indikation

Cosmopor Transparent anvendes til postoperativ sårpleje, let væskende sår og beskytter mod bakterier og som steril forbinding til mindre sår.

Cosmopor Transparent må ikke anvendes på inficerede eller stærkt blødende sår samt på sår med høj ekssudatmængde.

Fikseringinstruktioner

Huden skal være tør, når filmen fikseres.

PAUL HARTMANN A/S
 Ørestads Boulevard 73
 2300 København
 T. 48 22 04 00
 E. info@dk.hartmann.info

www.dk.hartmann.info
www.hartmann.info

Sortiment	Størrelse	Sårpude	Varenr.	Afp	Tfp
Cosmopor [®] Transparent Steril, pakket enkeltvis	5 x 7,2 cm	2,5 x 4 cm	901 051	50 stk	10 Afp
	9 x 10 cm	4 x 6 cm	901 053	50 stk	10 Afp
	9 x 15 cm	4 x 11 cm	901 055	25 stk	10 Afp
	10 x 12 cm	5 x 8 cm	901 056	25 stk	10 Afp
	10 x 20 cm	5 x 16 cm	901 058	25 stk	10 Afp
	10 x 25 cm	5 x 20 cm	901 059	25 stk	10 Afp
	10 x 30 cm	5 x 25 cm	901 060	25 stk	10 Afp