



## Bacillol® Wipes

Alkoholische Schnell-Desinfektionstücher mit breiter Wirksamkeit für den Einsatz im Bacillol® Wipes-Spender.



### Produkteigenschaften

- Gebrauchsfertige, mit Bacillol® AF getränkte Desinfektionstücher für den Einsatz im Bacillol® Wipes Spender
- Farbstoff-, parfüm- und aldehydfrei
- Ohne Handschuhe verwendbar\*
- Schnell und breit wirksam
- Gute Benetzung und schnelle Auftrocknung
- Reißfestes und saugfähiges PET-Vlies
- Tücher im Spender 28 Tage verwendbar

### Anwendungsgebiete

Im Bacillol® Wipes Spender anwendbar zur schnellen Desinfektion alkoholbeständiger Flächen und medizinischen Inventars. Im Gesundheitswesen, in Labors sowie Großküchen und im Lebensmittelbereich. In Bereichen, in denen eine schnelle Einwirk- und Abtrocknungszeit notwendig ist.

### Wirksamkeit

Bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS

Wirksamkeit	Prüfmethode	Belastung	Einwirkzeit
<b>Bakterien / Pilze</b>			
Bakterizidie/Levurozidie	VAH	hoch	1 Min.
	EN 13727 / EN 13624/ EN 16615	hoch	30 Sek.
Tuberkulozidie	VAH / EN 14348 / EN 16615	hoch	1 Min.
Mykobakterizidie	VAH / EN 14348 / EN 16615	hoch	1 Min.
Fungizidie	VAH	hoch	5 Min.
	EN 13624 / EN 16615	hoch	5 Min.
<b>Viren</b>			
Begrenzte Viruzidie (inkl. HBV, HIV, HCV)	DVV / RKI		15 Sek.
	EN 14476 / EN 16777	hoch	1 Min.
Begrenzt viruzid PLUS	DVV / RKI		1 Min.
	EN 14476 / EN 16777	hoch	5 Min.
Norovirus	EN 14476 / EN 16777	hoch	3 Min.
<b>Lebensmittel / Industrie</b>			
Bakterizidie/Levurozidie	EN 13697/ EN 1276/ EN 1650	hoch (4 °C, 10 °C und 20 °C)	1 Min.

\* sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen

# Bacillo® Wipes



**Haltbarkeit nach Anbruch**  
28 Tage

**Zusammensetzung**  
Angaben beziehen sich auf die Tränklösung Bacillo® AF  
Propan-1-ol 450 mg/g; Propan-2-ol 250 mg/g; Ethanol 47 mg/g

**Listung**  
Angaben beziehen sich auf die Tränklösung Bacillo® AF: VAH, ÖGHMP, IHO-Desinfektionsmittelliste

**Chemisch-physikalische Daten**  
Flammpunkt (gem. DIN 51755) 25 °C  
Dichte (20 °C) ca. 0,86 g/cm<sup>3</sup>

## Anwendung

Bacillo® Wipes sind gebrauchsfertig zu verwenden. Oberflächen mit den Bacillo® Wipes sorgfältig abwischen. Auf vollständige Benetzung und die entsprechende Einwirkzeit achten, damit der optimale Desinfektionserfolg gewährleistet ist.

Keine Desinfektionsmittellösung in das Innere elektrischer Geräte gelangen lassen. Die Angaben des Geräteherstellers sind zu beachten.

Für Acrylglas (PMMA) sowie alkoholempfindliche Lacke nicht einsetzbar. Bei empfindlichen Flächen Beständigkeitsprüfung an unauffälliger Stelle vornehmen.

Hinweis: Die Schutzkappe des Entnahmesystems ist nach Entnahme eines Bacillo® Wipes wieder fest zu verschließen. Nicht zur Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Produktname	Packungsinhalt	Artikelnummer	PZN	Versand-Einh. Packungen
<b>Bacillo® Wipes</b>	90 Tücher Standbodenbeutel Größe 380 x 200 mm	981 911	3427466	4
	1 Spender	981 912	4065901	4

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. im Hinblick auf Materialverträglichkeit, sind nur im Einzelfall gesondert möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schließen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke nicht aus. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. Diese richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

*Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*



Hilft. Pflegt. Schützt.

Vertrieb:  
**PAUL HARTMANN Ges.m.b.H.**  
IZ NÖ Süd Straße 3  
A-2355 Wiener Neudorf

Telefon +43 2236 64630-0  
office@at.hartmann.info  
www.at.hartmann.info

Hersteller: BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, D-22525 Hamburg  
Ein Unternehmen der HARTMANN GRUPPE