



Bacillo[®] Zero Tissues

Auf organischen Säuren basierende, umfangreich wirksame und materialschonende Reinigungs- und Desinfektionstücher.



Anwendungsgebiete / Zweckbestimmung

Reinigende Desinfektion von nicht invasiven Medizinprodukten. Reinigende Desinfektion von invasiven Medizinprodukten, nicht jedoch als letzter Schritt der Aufbereitung.

Bacillo[®] Zero Tissues eignen sich zur unkomplizierten materialschonenden Schnelldesinfektion von:

Flächen gem. Biozidproduktregistrierung (BPR), wie:

- Displays und Tastaturen bzw. Bedienfelder empfindlicher Kommunikationsgeräte, z.B. Mobiltelefone, Computer
- empfindliche Oberflächen – z.B. aus Makrolon[®], Acrylglas und Polysulfon sowie Kunstleder – in Einrichtungen des Gesundheitswesens

Medizinischen Geräten und Inventar, wie:

- Displays und Tastaturen bzw. Bedienfelder empfindlicher mobiler und stationärer medizinischer Geräte, z.B. Überwachungsmonitore
- empfindliche nicht invasive Medizinprodukte, z.B. Mammografiegeräte, OP-Lampen

Produkteigenschaften

- 100% plastikfreies Vliestuchmaterial
- Viruzid in 2 Minuten
- >98,5 % organische Inhaltsstoffe
- Patentierte Formulierung – organic acid complex
- Frei von Alkoholen, quartären Ammoniumverbindungen, Peroxiden und von Parfüm- und Farbstoffen
- Keine Gefahrstoffkennzeichnung – ohne Handschuhe anwendbar*
- Sehr gute Materialverträglichkeit

Wirksamkeiten (hohe Belastung)			
Bakterien / Pilze			
Bakterizid / levurozid	EN 13727 / EN 13624 / EN 16615		2 Min.
	VAH		5 Min.
Tuberkulozid / mykobakterizid	EN 14348 / EN 16615		60 Min.
Viren			
Begrenzt viruzid	EN 14476 / EN 16615**		2 Min.
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476 / EN 16615**		2 Min.
Viruzid	EN 14476 / EN 16615**		2 Min.

* Sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen

** Modifizierter 4-Felder Test

Wirksamkeit

Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS, viruzid

Bacillo[®] Zero Tissues



Anwendung

Oberflächen mit den Bacillo[®] Zero Tissues sorgfältig abwischen. Auf vollständige Benetzung achten, damit der optimale Desinfektionserfolg gewährleistet ist. Aufgrund ihrer Zusammensetzung können die Bacillo[®] Zero Tissues auch ohne den Gebrauch von Handschuhen eingesetzt werden, sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen.

Nach einmaligen Gebrauch Tissue der Abfallentsorgung zuführen.

Um das vorzeitige Austrocknen der Tücher zu verhindern, Tücherverpackung direkt nach Gebrauch wieder verschließen.

Keine Desinfektionsmittellösung in das Innere elektrischer Geräte gelangen lassen. Die Angaben des Geräteherstellers sind zu beachten. Nicht zur Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Bei Produktwechsel ist eine Zwischenreinigung durchzuführen.

Haltbarkeit

In geöffnetem und wieder fest verschlossenem Flowpack: 3 Monate

Tuchmaterial

100% plastikfrei aus natürlicher Faser, Größe 20 x 17 cm, Reichweite 1,5 m²; XL: Größe 20 x 30 cm, Reichweite mind. 2 m²

Zusammensetzung

(+)-Weinsäure mit 5 mg/g und Natriumbenzoat mit 5 mg/g

Klassifizierung

Biozid/Medizinprodukt IIa

Listung

ÖGHMP, VAH, IHO-Desinfektionsmittelliste

Chemisch-physikalische Daten

Die Angaben beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit Bacillo[®] Zero:

Flammpunkt

(DIN EN ISO 3679) nicht entflammbar

Dichte (20 °C)

1 g/cm³

pH-Wert (20 °C):

2,1-2,4

Produktname	Packungsinhalt	Artikelnummer	PZN	Versand-Einh. Packungen
Bacillo[®] Zero Tissues	100 Tücher Flowpack Größe 20 x 17 cm	981 935	5814397	6
Bacillo[®] Zero Tissues XL	80 Tücher Flowpack Größe 20 x 30 cm	981 936	5868795	6
Flowpack Wandhalter	1 Wandhalter	981 205	4065893	1
Flowpack-Halter flex	1 Halter	981 899	-	10

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. im Hinblick auf Materialverträglichkeit, sind nur im Einzelfall gesondert möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schließen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke nicht aus. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. Diese richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Hilft. Pflegt. Schützt.

Vertrieb:

PAUL HARTMANN Ges.m.b.H.
IZ NÖ Süd Straße 3
A-2355 Wiener Neudorf

Telefon +43 2236 64630-0
office@at.hartmann.info
www.at.hartmann.info

Hersteller: BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, D-22525 Hamburg
Ein Unternehmen der HARTMANN GRUPPE